



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAZALNI ASPIRATOR



www.prizma.rs



Upozorenja

Pre upotrebe ovog aparata, pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu. Sačuvajte ovo uputstvo kao podsetnik.

1. Ovaj aparat nije igračka; ne dozvolite deci da se igraju sa njim. Držite aparat van domašaja dece da biste sprečili eventualno gutanje sitnih delova aparata od strane dece.
2. Aparat je namenjen za čišćenje zapušenog nosa; ne koristite ga u bebinim ustima ili ušima.
3. Obavezno očistite aparat ukoliko je količina nakupljenog sekreta veća od preporučene maksimalne količine (približno 4 ml). Aparat obavezno temeljno očistite i osušite pre i posle upotrebe (pogledajte odeljak „Čišćenje aparata“).
4. Nemojte ubacivati silikonski nastavak (navlaku) isuviše duboko u nozdrvu.
5. Nemojte predugo koristiti aparat, nekoliko sekundi je dovoljno.
6. Nemojte koristiti aparat ukoliko u nozdrvama postoje rane, simptomi upale ili krvarenje iz nosa.
7. U slučaju da dođe do infekcije, groznice, iritacije nozdrva ili krvarenja iz nosa, prestanite sa upotrebom aparata i konsultujte doktora.
8. Aparat služi samo za ličnu upotrebu.
9. Silikonski nastavak je deo aparata koji dolazi u neposredan dodir sa korisnikom.
10. Nemojte modifikovati bilo koji deo aparata. Nemojte rasklapati aparat bez prethodnog čitanja uputstva za upotrebu.
11. Zamenite baterije kada primetite da je usisna moć aparata oslabila tokom upotrebe.
12. Radni ciklus: 30 sekundi uključen / 2 minuta isključen.
13. Očekivani životni vek ovog aparata je 3 godine kod uobičajenog korišćenja.



Upozorenja u vezi baterija


1. Koristite isključivo alkalne baterije.
2. Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa.
3. Nemojte istovremeno koristiti alkalne, obične (karbon-cink) i punjive (nikl-kadmijum) baterije.
4. Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije.
5. Prilikom postavljanja baterija vodite računa o njihovom polaritetu.
6. Istrošene baterije što pre izvadite iz aparata.
7. Vodite računa da sve kontaktne površine budu čiste pre postavljanja baterija.
8. Baterije mogu eksplodirati ukoliko nisu odgovarajućeg tipa.
9. Izvadite baterije ukoliko nećete koristiti aparat duži vremenski period; to možete jednostavno uraditi koristeći rupice odeljka za baterije.



Sadržaj pakovanja

1 aparat	1 uputstvo za upotrebu
1 silikonski nastavak (navlaka) za decu	2 rezervna silikonska prstena
1 silikonski nastavak (navlaka) za odrasle	2 alkalne baterije AA od 1,5V

Delovi aparata

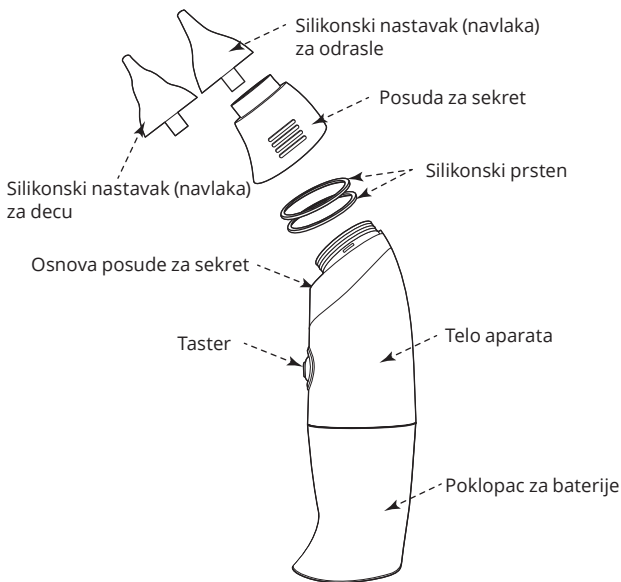

Napomena

Elektromagnetska emisija

ME8202X je namenjen za upotrebu u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja ME8202X treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.

Test emisije	Usaglašenost	Elektromagnetsko okruženje - preporuke
VF emisije CISPR 11	Grupa 1	ME8202X koristi VF energiju samo za svoje interne funkcije. Zato je njegova VF emisija vrlo niska i ne bi trebala da pravi smetnje okolnim elektronskim uređajima.
VF emisije CISPR 11	Klasa B	ME8202X je pogodan za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućno okruženje, i za priključenje na javnu niskonaponsku električnu mrežu za napajanje domaćinstava.
Emisija harmonika IEC 61000-3-2	Ne primenjuje se	
Varijacije napona/treperenje napona IEC 61000-3-3	Ne primenjuje se	

Elektromagnetska imunost

ME8202X je namenjen za upotrebu u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja ME8202X treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.

Test imunosti	IEC 60601 - ispitni nivo	Nivo usaglašenosti	Elektromagnetsko okruženje - preporuke
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV kroz vazduh	± 6 kV kontakt ± 8 kV kroz vazduh	Pod mora biti od drveta, betona ili keramičkih pločica. Ako je pod prekriven sintetičkim materijalom, relativna vlažnost mora biti barem 30%.
Brze promene napona/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV za linije napajanja	Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
Tranzijenti napona IEC 61000-4-5	± 1 kV linija(e) / linija(e) ± 2 kV linija(e) / linija(e)	Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
Propadi napona, kratki prekidi i promene napona na ulaznim linijama za napajanje IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % propad UT*) tokom 0.5 periode 40 % UT (60 % propad UT*) tokom 5 perioda 70 % UT (30 % propad UT*) tokom 25 perioda <5 % UT (>95 % propad UT*) tokom 5s	Ne primenjuje se	Ne primenjuje se
Frekvencija napajanja (50/60 Hz) magnetno polje IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Ako dođe do izobličenja slike, možda će biti potrebno pozicionirati ME8202X pojačivač slike dalje od izvora frekvencije magnetskog oklopa. Frekvencija magnetnog polja treba da bude izmerena na predviđenom mestu korišćenja da bi se osiguralo da bude dovoljno niska.

Elektromagnetska imunost

ME8202X je namenjen za upotrebu u niže opisanim okruženjima. Korisnici uređaja ME8202X treba da obezbede da se on koristi u takvim okruženjima.


Test imunosti	IEC 60601 - ispitni nivo	Nivo usaglašenosti	Elektromagnetsko okruženje - preporuke
Konduktivne VF IEC 61000-4-6	3 Vef 150 kHz do 80 MHz	Ne primenjuje se	Prenosni i mobilni VF uređaji ne treba da se koriste pored ME8202X i kablova povezanih sa njim bliže od preporučene razdaljine, koja je izračunata po jedančini primenljivoj za frekvenciju predajnika. Preporučena najmanja razdaljina $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz do 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$ 800 MHz do 2.5 GHz gde je P maksimalna izlazna snaga predajnika u vatima (W) prema podacima proizvođača predajnika, a d je preporučena najmanja razdaljina u metrima (m). Jačina polja nepokretnog VF predajnika izmerena na elektromagnetnom ispitnom poligonu ^a mora u svakom opsegu frekvencija da bude manja od traženog nivoaa usaglašenosti ^b . Smetnje mogu da nastanu u blizini uređaja sa sledećim simbolom: 
Izračene VF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2.5 GHz	3 V/m	

NAPOMENA 1: Na 80 MHz i 800 MHz, primenjuje se formula za sledeći viši opseg frekvencija.
NAPOMENA 2: Preporuke nisu primenjive u svim situacijama. Na prostiranje elektromagnetskog zračenja utiče apsorpcija i refleksija od pregrada, objekata i ljudi.

^a Jačina polja iz okolnih predajnika kao što su bazne stanice radio telefonije (mobilne i bežične), zemaljske radio stanice, radio-amaterske stanice, AM i FM radio difuzne i TV difuzne stanice ne može teorijski da se precizno izračuna, ali može da se izmeri odgovarajućom mernom opremom ako je to potrebno. Ako je izmereni nivo jačine polja na mestu na kome se koristi ME8202X viši od gore navedenog nivoaa VF usaglašenosti, treba proveriti da li ME8202X normalno radi. Ako se primete nepravilnosti u radu, treba primeniti dodatne mere kao što su promena orijentacije i mesta na kome se nalazi ME8202X.

^b U opsegu frekvencija od 150kHz do 80MHz, jačina polja treba da bude manja od 3V/m.


Upotreba aparata:

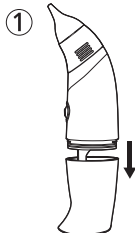

Odvojite poklopac za baterije od tela aparata povlačeći ga pravo na dole. Nemojte koristiti prekomernu silu.



Postavite 2 alkalne baterije AA od 1,5V vodeći računa o polaritetu baterija (+/-).

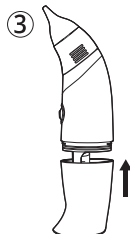

Proverite da li dva silikonska prstena pravilno leže u žljebovima. Vratite poklopac za baterije dok ne čujete „klik“ zvuk.

- ④ Izaberite silikonski nastavak (navlaku) koji odgovara veličini nozdrva pacijenta.




- ⑤ Proverite da li silikonski nastavak (navlaka) lepo naleže na posudu za sekret.




- ⑥ Pažljivo postavite silikonski nastavak (navlaku) u nozdrvu pacijenta (ne previše duboko).



- ⑦ Pritisnite i držite taster nekoliko sekundi da usisate sekret iz nozdrve. Pustite taster kada želite da završite usisavanje sekreta.

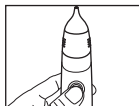


- ⚠ Ukoliko je količina nakupljenog sekreta blizu preporučene maksimalne količine (približno 4 ml), očistite i osušite aparat pre upotrebe. Ne koristite aparat ukoliko je nivo sekreta u posudi blizu kanala za otvaranje (pogledajte ilustraciju desno).

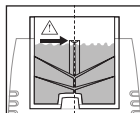


Čišćenje aparata:


- ① Pre čišćenja aparata, proverite da li je poklopac za baterije pravilno spojen sa telom aparata.

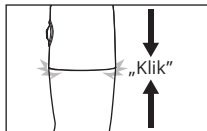


- ② Skinite silikonski nastavak (navlaku).

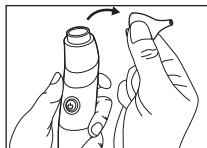



- ③ Uхватite posudu za sekret između palca i kažiprsta.

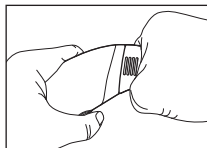



- ④ Polako nakrenite posudu za sekret ka dole da bi ste je odvojili od osnove.

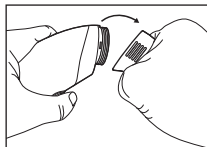


- ⑤ Posle nekoliko korišćenja aparata uklonite silikonske prstenove sa osnove posude za sekret i očistite ih. Oni se ne moraju čistiti posle svakog korišćenja.

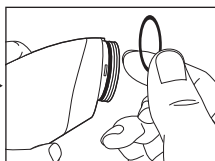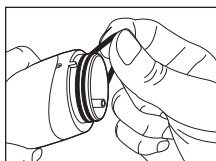

- ⑥ Temeljno operite delove aparata čistom vodom i blagim deterdžentom/sapunom. Isperite osnovu posude za sekret mlazom čiste vode. Osušite delove pre ponovnog sklapanja.

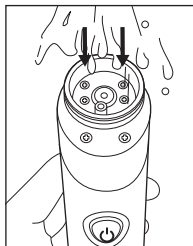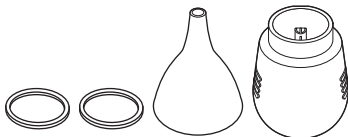

- ⑦ Ponovo sklopite delove aparata na način prikazan na donjim ilustracijama.

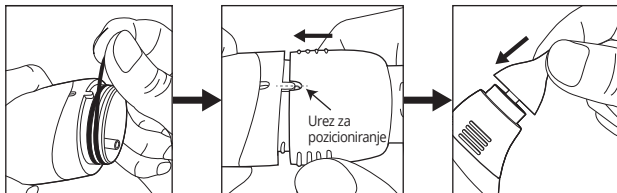


*Pravilno poravnajte urez za pozicioniranje sa posudom za sekret.



- ⑧ Proverite da li su svi delovi aparata pravilno vraćeni na svoje mesto.

Ukoliko je količina nakupljenog sekreta veća od preporučene maksimalne količine (približno 4 ml) u posudi za sekret ili ako vidite da sekret curi iz otvora za vazduh sa zadnje strane osnove za posudu za sekret, pratite sledeća uputstva:

- ① Pre čišćenja aparata, proverite da li su poklopac baterija i telo aparata čvrsto spojeni
- ② Skinite silikonski nastavak (navlaku) i posudu za sekret.

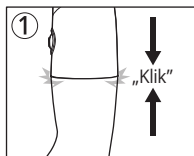

- ③ Potopite osnovu za posudu za sekret u čistu vodu kao što je prikazano na ilustraciji desno. Držite taster oko 15 sekundi i unutrašnja pumpa će biti očišćena.
- ④ Voda će ulaziti i izlaziti iz unutrašnje pumpe u smeru prikazanom na ilustraciji 4.
- ⑤ Prospite zaprljanu vodu, sipajte čistu i ponovite korak ③ nekoliko puta ako je potrebno.
- ⑥ Izvadite aparat iz vode kada završite čišćenje. Zatim držite taster još oko 30 sekundi dok se unutrašnja pumpa ne osuši.
- ⑦ Osušite osnovu posude za sekret i sklopite aparat.

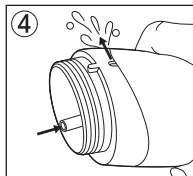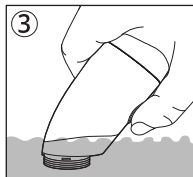

Izjava o saobraznosti

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa članom 50 Zakona o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi dve godine od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom. Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u radu, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

Izjava se ne odnosi na:

- Potrošni materijal (baterije, posuda za sekret, silikonski nastavci (navlake) i prstenovi)
- Oštećenja i neispravnost proizvoda nastala usled:
 - Mehaničkih oštećenja (krivicom kupca ili treće osobe) i curenja baterija
 - Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
 - Vršanja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
 - Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.

Informacije o radu, čuvanju i transportu aparata

Radna temperatura i vlažnost	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C Vlažnost: 15% ~ 93% Atmosferski pritisak: 700 hPa ~ 1060 hPa
Temperatura i vlažnost prilikom čuvanja i transporta	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C Vlažnost: ≤ 93% Atmosferski pritisak: 700 hPa ~ 1060 hPa

Primenjeni standardi

Ovaj aparat ispunjava odredbe EC Direktive MDD (93/42/EEC).

Sledeći standardi su primenjeni prilikom dizajniranja i proizvodnje ovog uređaja:

- IEC / EN 60601-1 Elektromedicinski uređaji - Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse
- IEC / EN 60601-1-2 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja
- IEC/EN 60601-1-6 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost
- IEC 60601-1-11 Elektromedicinski uređaji - Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste u okruženju kućne zdravstvene nege
- EN ISO 10993-5 Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 5: Ispitivanja citotoksičnosti in vitro
- EN ISO 10993-10 Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 10: Ispitivanja iritacije i kasnog tipa preosetljivosti



Pročitajte uputstvo za upotrebu



Pogledajte LOT oznaku na aparatu



BF tip primenjenog dela

CE0120

IP22

Zaštita od čvrstih stranih objekata veličine Ø12.5 mm i većih; zaštita od vertikalno padajućih kapi vode kada je sklop nagnut pod uglom do 15°



Otpad iz električne i elektronske opreme (WEEE)



Proizvođač		Asia Connection Co., Ltd. 16 F-1, No 16, Jian Ba Rd., Chung Ho District, New Taipei City, 23511 Tajvan		
Predstavnik u EU	<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	Obelis S.A. Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgija Tel: +32 2.732.59.54, Fax: +32 2.732.60.03 E-mail: mail@obelis.net
EC	REP			
Uvoznik / ovlašćeni predstavnik proizvođača		PRIZMA Kragujevac d.o.o. Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija		
Broj rešenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije		515-02-02466-18-001		